

LSPQ : RÉSUMÉ DES ÉTAPES POUR CONSTITUTION DES POOLS POUR Dx du SRAS-COV-2  
Version 1 : 2020-03-17

1. Positionnement des tubes d'écouillons et impression des étiquettes.



2. Étiquetage des tubes de 2 mL





LSPQ : RÉSUMÉ DES ÉTAPES POUR CONSTITUTION DES POOLS POUR Dx du SRAS-COV-2  
Version 1 : 2020-03-17

5. Pooling de 8 échantillons sous ESB – 200 µl par échantillons dans un tube pré-étiqueté (ex. 1-PL1, 1-PL-2, ...)



SARS-COV 23-PL22	SAF 24-1
SARS-COV 23-PL23	SA 24-
<u>SARS-COV</u> 24-PL1	SA 24
SARS-COV 24-PL2	SA 24
SARS-COV 24-PL3	S 2
SARS-COV 24-PL4	S
SARS-COV 24-PL5	S

6. Mise en boîte de 9X9 (8 échantillons + 1 tube de pool par colonne)



7. L'ARN des pools est extrait et ceux-ci sont ensuite testés par TAAN.
8. Les échantillons des pools qui s'avèrent positifs devront être extraits et testés individuellement pour identifier le ou les échantillons positifs dans le pool.